

NP 15

Die leiseste Nasal-Pillow-Maske für höchste Sicherheit und Tragekomfort

Nur 15 dB bei 10 hPa – unsere Nasal-Pillow-Maske NP 15 bietet auf allen Gebieten Höchstleistungen: Sie ist leise, klein und dennoch stabil und leistungsfähig. Darüber hinaus ist NP 15 leicht zu handhaben und bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, den Schlauch sicher zu fixieren. So bleibt dieser zuverlässig in Position und garantiert viel Tragekomfort; und somit eine hohe Compliance. Auch die Kugelgelenke, eines am Maskenkörper und eines zwischen Masken- und Geräteschlauch, sorgen für unbeschränkte Bewegungsfreiheit bei einem stabilen Sitz.



NP 15, WM 26755



Die 2 Kugelgelenke der Maske sorgen...



... für unbeschränkte Bewegungsfreiheit

Therapiekomfort

- die leiseste Nasal-Pillow-Maske
- Verfügt über zwei Kugelgelenke:
 - Ein Kugelgelenk sitzt am Maskenkörper und sorgt für unbegrenzte Beweglichkeit.
 - Das zweite Kugelgelenk befindet sich zwischen Masken- und Geräteschlauch. Das ermöglicht einen stabilen, leckagefreien Sitz.
- Verfügt über 2 Schlauchfixiermöglichkeiten (Clip und Fixierband), mithilfe derer der Schlauch nachts zuverlässig in Position gehalten wird.
- integrierter Druckmessstutzen
- Kein störender Luftzug, da der Ausatemstrom vom Gesicht weggeleitet wird und der Abströmspalt zum Gesicht hin geschlossen ist
- optimale Passform
- klein, zierlich und dennoch sicher und stabil
- besteht aus hautverträglichem Silikon

Bedienkomfort

- Dank der unterschiedlich farbigen Klettzungen (hellblau oben, dunkelblau unten) ist die Bänderung sehr einfach zu bedienen.
- einzeln bewegliche Pillows
- Das Querband der Bänderung ist einstellbar.
- drei Pillowgrößen
- einfache und schnelle Maskenanpassung durch die höhenverstellbare Stirnstütze
- sofort gebrauchsfertig, da alles Nötige im Lieferumfang enthalten ist
- Markierungen für den Einstellbereich Stirnstütze
- leichte Handhabung durch die geringe Zahl der Einzelteile
- Die Kopfbänderung sitzt oberhalb der Ohren. Das ermöglicht z. B. das einfache Auf- und Absetzen der Maske.
- Die vielen Ersatzteile helfen Kosten zu reduzieren.

Position im Hilfsmittelverzeichnis: Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Produkt-Bezeichnung	WM-Nr.	HMV-Pos.-Nr.
NP 15	26755	in Beantragung



Lieferumfang

- 1 Nasenpolster, Gr. S (o. Abb.) – WM 26782
Nasenpolster, Gr. M (o. Abb.) – WM 26787
Nasenpolster, Gr. L – WM 26792
- 2 Kopfbänderung inkl.
Schlauchfixiermöglichkeiten – WM 26775
- 3 Set, Stirnstütze – WM 15623
- 4 Stirnpolster – WM 26777
- 5 Set, Maskenschlauch – WM 15744
- 6 Schlauchfixierclip – WM 26728
Schlauchfixierband (o. Abb.) – WM 26774
Set, Bänderungsclips (2 Stück) (o. Abb.) – WM 15622

Unser vollständiges Angebot an Therapielösungen, Zubehör und Maskensystemen finden Sie unter: weinmann.de

Technische Daten NP 15



Produktklasse nach 93/42/EWG:	II a	Temperaturbereich	<ul style="list-style-type: none"> ■ Betrieb: +5 °C bis +40 °C ■ Lagerung: -20 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T):	ca. 140 x 100 x 40 mm	Strömungswiderstand	<ul style="list-style-type: none"> ■ bei 50 l/m: ≤ 0,9 hPa ■ bei 100 l/m: ≤ 3,5 hPa
Gewicht:	ca. 90 g (abhängig von Größe und Ausführung)	Schalldruckpegel	<ul style="list-style-type: none"> ■ bei 10 hPa: 15 dB(A)
Therapiedruckbereich:	4 hPa bis 25 hPa	Gebrauchsdauer:	bis zu 12 Monate (Materialien, die zur Herstellung von Masken verwendet werden, altern, wenn sie z. B. aggressiven Reinigungsmitteln ausgesetzt sind. Im Einzelfall kann es daher notwendig sein, die Maske früher zu ersetzen.)
Schlauchanschluss:	Konus nach DIN EN ISO 5356-1 Ø 22 mm (männl.)		
Druckmessanschluss:	Ø 4 mm		

3089-01-DE-0210-1 © Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Weinmann. Alle Angaben aus drucktechnischen Gründen ohne Gewähr.

■ **Deutschland** ■ Weinmann Geräte für Medizin GmbH+Co.KG · Postfach 540268 · 22502 Hamburg · Kronsaalsweg 40 · 22525 Hamburg · E: info@weinmann.de · www.weinmann.de
T: 040-5 47 02-0 · F: 040-5 47 02-461 ■ **Zentrum für Produktion, Logistik, Service** · Weinmann Geräte für Medizin GmbH+Co.KG · Siebenstücken 14 · 24558 Henstedt-Ulzburg · T: 04193-88 91-0
F: 04193-88 91-450 ■ **Schweiz** ■ G. Weinmann AG – Neuenhof · T: +41-(0)56-416 41 11 · E: info@ch.weinmann.de · www.weinmann.de ■ **Frankreich** ■ Weinmann S.A.S. – Paris-Igny
T: +33-(0)1 69 35 53 20 E: info@fr.weinmann.de · www.weinmann.de ■ **Russland** ■ Weinmann SPb GmbH – St. Petersburg · T: +7-(812)6 33 30 82 · E: info@ru.weinmann.de
www.weinmann.de ■ **China** ■ Weinmann GmbH+Co.KG · (Shanghai Rep. Office) · T: +86 21 32 26 26 98 · E: info@cn.weinmann.de · www.weinmann.de