

JOYCEone



Zeitsparend und passgenau.

JOYCEone. Made for you.



Zeitraubendes Einstellen ist Vergangenheit. Wir bieten Ihnen mit JOYCEone eine Beatmungsmaske, die nahezu immer passt. Sie ist das Ergebnis jahrzehntelanger Maskenexpertise und als Nasal- oder Mund-Nasen-Variante erhältlich.

Hand in Hand: Wohlfühlkomfort und Therapieerfolg

Die Stirnstütze sorgt mit ihrem flexiblen Federprinzip automatisch dafür, dass sie immer therapiegerecht im richtigen Abstand stabil und zugleich komfortabel an der Stirn aufliegt. Ähnlich clever funktioniert das einschichtige Maskenkissen. Dank seiner optimierten Form findet es von selbst die ideale Position – unabhängig von der Nasen- bzw. Gesichtsgröße.

Die Vorteile von JOYCEone


- Zeitsparend:
Automatische Anpassung von Stirnstütze **2** und Maskenkissen **1**
- Unverwechselbare Montage:
Eindeutige Farbcodierung von Kopfbänderung und Bänderungsclips **4**
- Wirtschaftlich: Eine Größe passt nahezu allen Patienten
- Bequem:
Mühelose Reinigung
- Angenehm:
Leises und diffuses Ausatemsystem **3**
- Stabil: Extrem belastbare Materialien

Durchdacht bis ins Detail

Ihre Patienten werden JOYCEone vom ersten Kontakt an lieben! Denn bei JOYCEone überzeugen nicht nur Passgenauigkeit und Tragekomfort, sondern auch die leichte Bedienung: Durch die unverwechselbare Farbcodierung von Kopfbänderung und Bänderungsclips mit Griffmulde lässt sich JOYCEone von Anfang an schnell und korrekt montieren.

Moderne Effizienz

Kurz und gut: Das intelligente JOYCEone-Prinzip unterstützt Sie, Ihre Zeit optimal zu nutzen, ohne Kompromisse bei der Patientenversorgung machen zu müssen. **JOYCEone – made for you!**

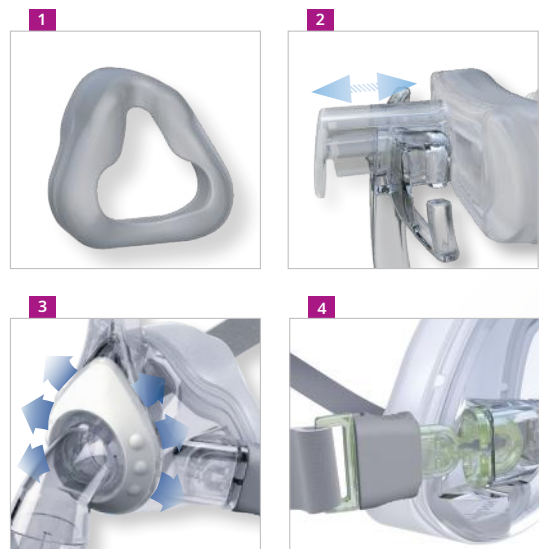

JOYCEone

Maskensitz bei verschiedenen
Nasengrößen



JOYCEone Full Face

Maskensitz bei verschiedenen
Nasen- und Gesichtsgrößen



Zubehör

Kopfbänderung

JOYCEone
inkl. Bänderungsclips
WM 25255

JOYCEone Full Face
inkl. Bänderungsclips
WM 25277

XL-Kopfbänderung
ohne Bänderungsclips
WM 25338

Stirnpolster
Silikon
WM 26801

Maskenkissen

JOYCEone
Silikon
WM 25253

JOYCEone Full Face
Silikon
WM 25293

Set Winkel

JOYCEone Full Face NV
Sicherungsring NV,
Winkel NV
WM 25275

Set Endoskopieadapter

JOYCEone Full Face NV
Sicherungsring NV,
Winkel NV
WM 15864

Set Kugelgelenk

JOYCEone
Sicherungsring, Winkel,
Drehhülse
WM 15908

JOYCEone Full Face
Sicherungsring, Winkel,
Notfallausatemventil,
Drehhülse
WM 15944

Reißleine
Schnellentriegelung
WM 26890

Weitere Informationen zu unseren Therapielösungen, Zubehör und Maskensystemen finden Sie unter loewensteinmedical.com

Technische Daten

	JOYCEone	JOYCEone Full Face	JOYCEone Full Face NV		JOYCEone	JOYCEone Full Face	JOYCEone Full Face NV
Produktklasse nach MDR (EU) 2017/745	II a			Strömungswiderstand Notfallausatemventil			
Abmessungen (B x H x T)	ca. 96 x 115 x 83 mm	ca. 89 x 155 x 97 mm		• Inspiration bei 50 l/min:	–	0,8 hPa ± 0,1 hPa	–
Gewicht	87 g	127 g	127 g	• Expiration bei 50 l/min:	–	0,6 hPa ± 0,1 hPa	–
Therapiedruckbereich	4 bis 30 hPa			Schalttdruck Notfallausatemventil			
Totraumvolumen	90 ml	240 ml		• Öffnen:	–	≤ 0,5 hPa	–
Schlauchanschluss Konus nach EN ISO 5356-1	Ø 22 mm (männl.)		Ø 22 mm (weibl.)	• Schließen:	–	≤ 0,8 hPa	–
Temperaturbereich				Angebener Zweizahl-Geräusch-Emissionswert nach ISO 4871:			
• Betrieb:	+5 °C bis +40 °C			• Schalldruckpegel:		19 dB(A)	–
• Transport und Lagerung:	-20 °C bis +70 °C			• Schallleistungspegel:		27 dB(A)	–
Strömungswiderstand				• Unsicherheitsfaktor:		3 dB(A)	–
• bei 50 l/min	0,2 hPa ± 0,1 hPa	0,3 hPa ± 0,1 hPa	0,03 hPa ± 0,1 hPa	Gebrauchsdauer	bis zu 12 Monate ¹		
• bei 100 l/min	0,9 hPa ± 0,1 hPa	0,7 hPa ± 0,1 hPa	0,11 hPa ± 0,1 hPa	Lebensdauer	5 Jahre		
				Angewandte Normen	EN ISO 17510:2020		

¹ Materialien, die zur Herstellung von Masken verwendet werden, altern, wenn sie z. B. aggressiven Reinigungsmitteln ausgesetzt sind. Im Einzelfall kann es daher notwendig sein, Maskenteile früher zu ersetzen.

Gerätebezeichnung	Artikel-Nr.	HMV-Pos.-Nr.
JOYCEone	WM 25260	14.24.16.2052
JOYCEone Full Face	WM 25290	14.24.16.6049
JOYCEone Full Face NV	WM 25270	14.24.16.1024

CE 0197



Löwenstein Medical Technology
Kronsaalweg 40
22525 Hamburg, Deutschland

Vertrieb + Service
Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Deutschland
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com



© Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Löwenstein Medical.
Alle Angaben aus drucktechnischen Gründen ohne Gewähr.

