



intuitiver
Touchscreen

Pulsoximeter
anschließbar

Oszillationen
einstellbar

Recruitment-
Manöver

Hustenassistent
und PRM

3 Programme
voreinstellbar

Mobilität
und Flexibilität:
Akku für 4
Anwendungen

Technische Daten

Physikalische Eigenschaften	Gewicht	Größe
Modul in Dockingstation	3,4 kg	29 x 21 x 13 cm
Dockingstation	1,5 kg	25 x 21 x 13 cm
Modul	1,9 kg	29 x 14,5 x 10 cm
Touchscreen	7" HD-Touchscreen (Farbe)	

Therapiemodi /-funktionen	INEX	PRM
Modi	INEX: IN-EX-Sufflation	PRM: Pressure Relief Maneuver
Steuerung	automatisch / manuell	automatisch
Oszillationen	AN / AUS Inspiration und Expiration Frequenz: 4-20 Hz, Amplitude: 3 Stufen	-
Monitoring	Insufflationsvolumen / Peak Flow / SpO ₂ und Herzfrequenz über ext. Sensor	

Einstellgrößen			
	INEX	PRM	
Inspirationsdruck	5-70 mbar	Flow	5-100 l/min
Inspirationszeit	0,5-5,0 s	Druck	10-50 mbar
Anstieg (Rampe)	1-5	max. Inspirationszeit	0,5-20 s
Trigger	AUS / 1-3	PEEP	1-10 mbar
Pause	AUS / 0,5-5,0 s	Trigger	AUS / AUTO / 1-5
PEEP	1-20 mbar	Flowform	dezel. / konstant
Expirationsdruck	0-(-70) mbar		

Artikelnummern

Bezeichnung	Artikelnummer ALMS	Artikelnummer EOVE
EOVE-70 Hustenassistent (HMF-Nr.: beantragt)	KC072279	EO-70SMD EUR
EOVE-70 Steuerpedal	KC072277	EO-70FSWITCH
NONIN XPOD SpO ₂ -Kabel	KC072267	EO-SPO2CBL

Kontakt

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS
Parc de Haute Technologie
6, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
France
www.device.airliquidehealthcare.com

Air Liquide Healthcare versorgt Kunden mit medizinischen Gasen, Home-Healthcare Serviceleistungen, Hygieneprodukten, medizinischem Equipment und Spezialinhaltsstoffen. Mit der Unterstützung von 16.500 Mitarbeitern beliefert Air Liquide Healthcare weltweit mehr als 15.000 Krankenhäuser und 1,5 Mio. Patienten.

Medizinprodukt Klasse IIb, CE



Hustenassistent EOVE-70



MOVE AND CARE CONCEPT BY

EOVE

Air Liquide Healthcare Lebensqualität gemeinsam erhalten

Jeder Mensch mit einer chronischen Erkrankung benötigt **kontinuierliche, individualisierte Unterstützung**.
Dafür entwickelt Air Liquide Healthcare **Lösungen**:



Unterstützt die Diagnostik in Kliniken
bzw. pneumologischen Abteilungen
und stellt neue Therapien zur Verfügung.




Entwickelt intelligente Lösungen für die Auswertung und den
Austausch von **Therapiedaten**, um gefährdete Patienten
oder Veränderungen im Gesundheitszustand besonders schnell
erkennen zu können.



Stellt Therapiesysteme zur Verfügung, die
eine komfortable, effektive und maßgesch-
neiderte Behandlung zu Hause ermöglichen.


Effektive IN-EX-Sufflation

EOVE-70 leistet eine Hustenunterstützung
von +70 bis -70 mbar zur Steigerung des
expirativen Peak Flow und zur besonders
effektiven Sekretmobilisation.

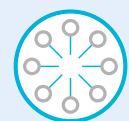


Umfassende und gezielt anpassbare Behandlung

- **Doppelfunktion**
 - IN-EX-Sufflation
 - leistungsfähig: +70 bis -70 mbar
 - Oszillation anpassbar pro Phase
 - Pressure Relief Maneuver (PRM)
- **3 individuell anpassbare Programme**

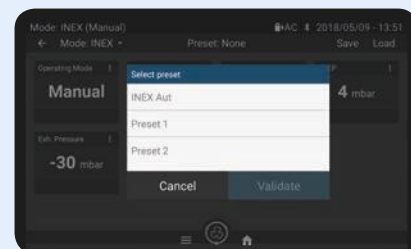

Intuitive Bedienung

- 7" HD-Touchscreen
- einfache Einstellung der Parameter
- übersichtliches Monitoring
- manuelle Therapiesteuerung ohne
Blick auf den Bildschirm möglich
- Fernsteuerung / Pedal anschließbar

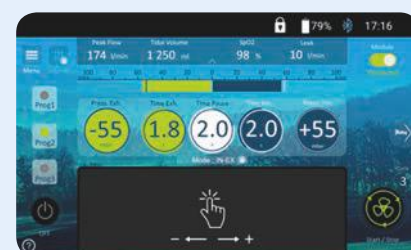

Der Patient im Mittelpunkt

**Einfach anzuwenden - in der häuslichen
Umgebung und in der Klinik**



Eine Behandlung, die hilft und nicht einschränkt

- entnehmbares, leichtes und kompaktes Modul
für mehr Flexibilität
- durch den internen Akku lässt sich das Gerät
direkt am Patienten verwenden - ohne Stolperfallen
im Raum durch Kabel.
- Akkulaufzeit bis zu 4 Anwendungen (bei Standard-
einstellungen)
- einfacher Anschluss und Einbindung eines
Pulsoximeters

